



Modello: YHR-LD02

Carrello montascale a batteria per sedie a rotelle

Manuale d'uso

Apertura della sedia a rotelle:

1. Per aprire la sedia afferrare lo schienale con una mano e il sedile con l'altra. Aprire lentamente la sedia fino a completa apertura.
2. La sedia si blocca automaticamente quando raggiunge l'apertura corretta ed è pronta per essere utilizzata.

Installazione della batteria

1. Allineare la batteria lungo la guida di supporto della batteria situata sul retro della sedia.
2. Inserire la batteria.
3. Bloccare la batteria ruotando la chiave di blocco.
4. La sedia è pronta per l'uso.



IMPORTANTE: seguire tutti i protocolli di

Sicurezza locali

Inserire sedia a rotelle nel carrello:

1. Posizionare la sedia a rotelle davanti ai fermi ruote rossi per avere un riferimento visivo della distanza necessaria tra i fermi.
2. Tirare la leva rossa di regolazione dei fermi verso l'esterno e verso l'alto per rilasciare il meccanismo di blocco dei fermi.
3. Far scorrere i fermi rossi verso l'interno o verso l'esterno a seconda della distanza necessaria per consentire alle ruote della sedia a rotelle di scorrere sui fermi.



Nota: Regolare la sedia a rotelle in modo che sia centrata sul carrello prima di bloccare la leva di supporto della ruota. La sedia a rotelle deve essere sistemata a contatto con il telaio, che deve essere centrato tra le maniglie della sedia a rotelle.

Nota: i fermi rossi sono regolabili in profondità. Se lo schienale della sedia non è a contatto con il telaio del carrello, è possibile regolare la profondità per adattarli alle dimensioni specifiche della ruota. Ci sono 2 bulloni su ogni fermo.

4. Bloccare i fermi della ruota tirando la leva rossa verso l'esterno e verso il basso.
5. Regolare i fermi laterali per bloccare la sedia sul carrello.
6. Fissare la sedia in posizione con i fermi rossi situati su ciascun lato del carrello.
7. Per regolare la distanza tra fermi estrarre la leva nera situata su ciascun fermo laterale. Far scorrere i fermi verso l'interno o verso l'esterno nella posizione necessaria.
8. Bloccare i fermi rilasciando la leva nera.

NOTA: i fermi devono essere agganciati ai montanti del telaio posteriore della sedia a rotelle, sopra o sotto i braccioli. Potrebbe essere necessario rimuovere i braccioli per fissare la sedia a rotelle al carrello.

Nota: è possibile regolare i fermi laterali in altezza per adattarli ai braccioli delle sedie con le leve nere poste sul lato anteriore del telaio del carrello. Svitare le manopole su entrambi i lati, far scorrere i supporti all'altezza desiderata e bloccare entrambe le manopole.



Preparazione per il carico del paziente:


1. Posizionare il carrello montascale accanto al paziente, una volta che la sedia a rotelle è in posizione, BLOCCARE le ruote.
2. Per bloccare le ruote spingere verso il basso la leva rossa situata sulla parte superiore delle ruote.
3. Assicurarsi che i fermi e i sistemi di bloccaggio siano innestati cercando di spostare la sedia.
4. Il paziente può essere sistemato solo se la sedia è bloccata.

Carico del paziente:

1. Aiutare il paziente a salire sul sedile utilizzando, se necessario, il telaio della sedia a rotelle per dare supporto e equilibrio.
2. Fissare il paziente con cinture addominali orizzontali (se fornite).

Trasporto in discesa del paziente:

1. Portare il montascale in cima alla scala.
2. Accendere la batteria con il pulsante rosso situato sul display digitale.
3. BLOCCARE le ruote.
4. Sbloccare i cingoli.
5. Per sbloccare i cingoli spingere la leva rossa situata dietro il sedile.
6. Fare aprire completamente e bloccare. Assicurarsi che i cingoli siano bloccati cercando di farli scorrere avanti e indietro. Se non si muovono significa che i cingoli sono bloccati.
7. Sollevare la barra di guida situata dietro la testa del paziente fino ad estensione completa. Per estendere la barra di guida, premere la leva orizzontale rossa situata sulla parte posteriore del sedile.
8. Fissare saldamente il supporto per la testa del paziente intorno alla barra di guida verticale con velcro.
9. Una volta effettuate le precedenti operazioni disinnestare le ruote bloccate premendo la linguetta rossa di sblocco situata sulla parte superiore delle ruote.
10. Inclinare lentamente lo schienale della sedia mantenendo i cingoli allineati con le scale e iniziare la discesa.
11. Premere il pulsante verde per la discesa sul display digitale per iniziare la discesa mantenendo una posizione inclinata. Per farlo applicare una leggera pressione verso il basso per mantenere i cingoli agganciati alle scale.
12. Quando la sedia raggiunge i gradini inferiori posizionare la sedia in posizione verticale assicurandosi che le ruote anteriori siano saldamente posizionate a terra.
13. Rilasciare i cingoli spingendo la barra di rilascio rossa situata sul retro della sedia e spingendo verso l'interno. Assicurarsi che i cingoli siano in posizione di blocco chiuso.
14. Assicurarsi che i cingoli siano bloccati tirando avanti e indietro. Se non si muovono significa che i cingoli sono bloccati. Il disinnesto dei cingoli attiverà le ruote posteriori.
15. Per spingere la sedia abbassare la maniglia di spinta e estendere le maniglie della sedia.

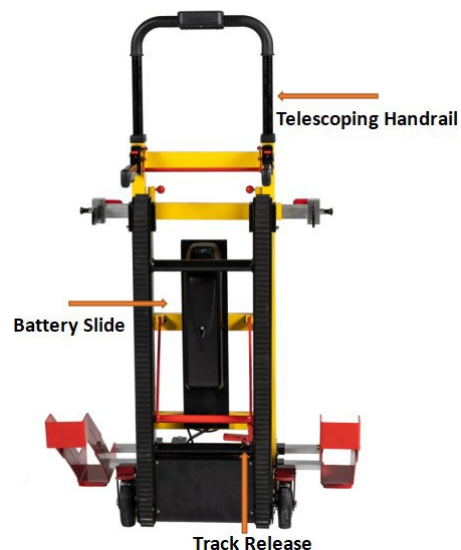

Trasporto in salita del paziente:

1. Posizionare il montascale sulle scale.
2. Inclinare lentamente lo schienale della sedia mantenendo i cingoli allineati con le scale e iniziare la salita.
3. L'operatore deve mantenere l'angolo di guida.
4. Applicare una leggera pressione verso il basso per mantenere i cingoli agganciati alle scale.
5. Spingere il pulsante blu per la salita sul display digitale e accompagnare la sedia verso l'alto uno scalino alla volta.
6. Una volta in cima alle scale indietreggiare quanto basta per abbassare in sicurezza la sedia e posizionarla in posizione verticale completa assicurandosi che le ruote anteriori siano saldamente posizionate a terra.

7. Rilasciare i cingoli spingendo la barra di rilascio rossa situata sul retro della sedia e spingendo verso l'interno. Assicurarsi che i cingoli siano in posizione di blocco chiuso.
8. Assicurarsi che i cingoli siano bloccati tirando avanti e indietro. Se non si muovono significa che i cingoli sono bloccati. Il disinnesto dei cingoli rilascerà le ruote posteriori.
9. Per spingere la sedia abbassare la maniglia di spinta ad un'altezza confortevole.

Come piegare il carrello:

1. Afferrare lo schienale con una mano e tirare la barra pieghevole rossa situata sotto la sedia con l'altra mano.
2. Guidare il carrello fino a completa chiusura.

Come ricaricare la batteria

1. Inserire la chiave per sbloccare il sistema di blocco della batteria
2. Far scorrere la batteria sulla guida
3. Collegare il cavo del caricabatterie alla batteria
4. Inserire il cavo di alimentazione nella presa a muro
5. Accendere l'interruttore di alimentazione della batteria per iniziare a caricare la batteria
6. Premere il pulsante di visualizzazione del livello di carica sulla batteria per visualizzare il livello di carica
7. Quando la batteria è sufficientemente carica scollegare il cavo dalla presa a muro e rimuovere il cavo del caricabatterie dalla batteria. Ripetere i passaggi precedenti per l'installazione della batteria

Display digitale

1. Se il display digitale funziona correttamente appare una barra verde illuminata che indica il livello di carica della batteria
2. Ci sono sei pulsanti sul pannello di controllo. (1) Freccia verde per la discesa (2) Pulsante di accensione rosso (3) Luce notturna gialla (4) Pulsante blu per la salita (5) Blu + Aumenta velocità (6) Blu – Diminuisce velocità



C.S. di Gisinti Paolo Srl
-unipersonale-
Via Traversa Provinciale Lucchese 79
51034 Serravalle Pistoiese Loc. Masotti (PT)
Partita IVA 01825790478 SDI SUBM70N



0573 91 95 22



info@csgisinti.it



www.csgisinti.it



EmerShop.it